

LOCKiT инструкция по применению



1
Подберите аттачмент LOCKiT по высоте




2
Установите аттачмент LOCKiT с усилием 30 Нсм




3
Установите силиконовые кольца и металлические контейнеры




4
Произведите примерку протеза

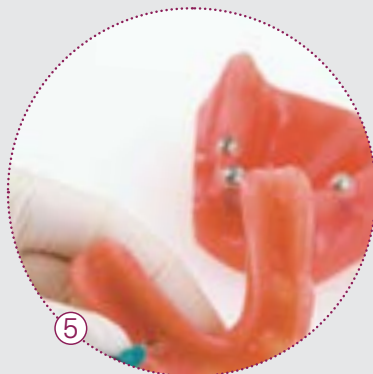

5
Внесите акрил в отверстия и поместите протез в полость рта

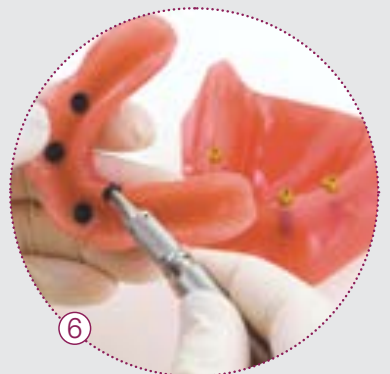

6
Извлеките технические матрицы (черные) из контейнеров

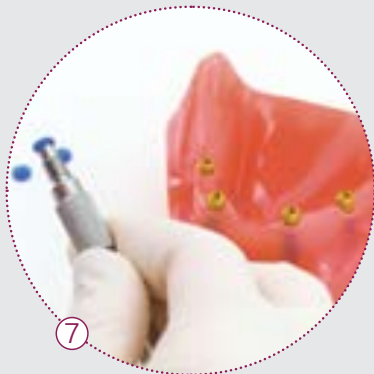

7
Установите матрицы необходимой степени ретенции



8
Произведите примерку протеза



9
Обучите пациента снимать и одевать протез и назначьте его на контрольный осмотр